

Des solutions personnalisées pour la coelioscopie



## Champ de coelioscopie abdo-périnéale **BARRIER®**

- Champ tout-en-un offrant des caractéristiques permettant une mise en place rapide et efficace par une seule personne afin de gagner du temps et de réduire le risque de contamination
- Bords adhésifs extensibles BARRIER® Flex, pour une excellente étanchéité dans le cadre d'un pneumopéritoine
- Poches et passe-tubulures intégrés, pour organiser la zone de travail
- Adhésif intégré, pour ajuster la longueur de la jambière
- Fenêtre périnéale avec cache intégré
- Matériaux totalement imperméables garantissant une sécurité optimale pour le patient

# Instructions de drapage



1. Pour commencer, placez le champ sous-fessier adhésif.



2. Vérifiez la direction indiquée par le pictogramme sur le champ de coelioscopie. Retirez le papier protecteur.



3. Posez le champ sur le patient, en le centrant. Dépliez-le, d'abord vers vous puis dans l'autre sens.



4. Vérifiez le pictogramme au niveau du pied. Dépliez le champ sur la jambe en tirant sur le coin de la jambière. Faites de même sur l'autre jambe.



5. Dépliez le champ vers la tête du patient.



6. Posez le cache-périnée sur les parties génitales. Si nécessaire, utilisez l'adhésif pour fixer l'extrémité du champ sur le devant de la blouse stérile de l'aide opératoire ou du chirurgien. Assurez-vous que le film adhésif est correctement attaché au patient et retirez le papier crêpe.



7. Le champ est en place.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur Mölnlycke Health Care ou visionner les vidéos d'instructions.



Réf.	Composants ProcedurePak	
944200	Champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm et fenêtre non adhésive 13 x 24 cm	
944210	Champ de coelioscopie 300/200/270 x 295 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm et fenêtre non adhésive 13 x 24 cm	
Réf.	Codes stériles	Conditionnement
694240	4 cellдук 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 passe-tubulures 2,5 x 30 cm, adhésive 1 champ opératoire adhésif 75 x 75 cm 1 champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm et fenêtre non adhésive 13 x 24 cm 1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm	5/10
694241	1 housse de Mayo 79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm 4 cellдук 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 passe-tubulures 2,5 x 30 cm, adhésive 1 champ adhésif 75 x 75 cm 1 champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm et fenêtre non adhésive 13 x 24 cm	5/10
694242	1 housse de Mayo 79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm absorbant 4 cellдук 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 passe-tubulures 2,5 x 30 cm, adh. 1 champ adhésif 75 x 75 cm 1 champ de coelioscopie 300/200/270 x 295 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm et fenêtre non adhésive 13 x 24 cm 1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm	5/10

Tous ces composants peuvent également être inclus dans les trousse ProcedurePak®

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique

Tél: +32 (0) 3-286 89 50. Fax: +32 (0)-286 89 52

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care, BARRIER®, ProcedurePak®, Safetac® et Biogel® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care. © 2016 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00391601)

  
**Mölnlycke®**